



KliniTray™

Dispositivo per l'analisi di tessuto e per la valutazione dei margini di resezione liberi

KliniTray™ è un prodotto brevettato Klinika Medical

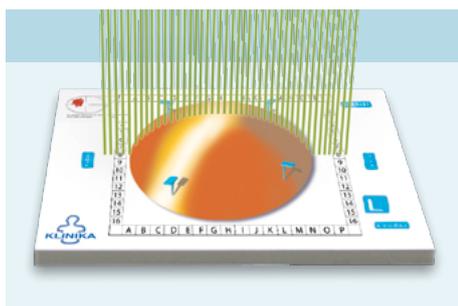

Radiografia orizzontale.

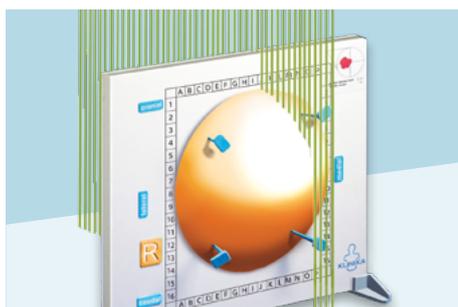

Radiografia verticale.




Misurazione dei margini di resezione liberi mediante ecografia del tessuto.

Il sistema **KliniTray™** consente l'analisi ed il trasporto di tessuti escissi prelevati dall'organismo. Grazie all'ausilio di questo sistema il tessuto può essere trasferito ed analizzato in un orientamento prestabilito tridimensionale spaziale e analizzato sia radiologicamente, sia ecograficamente.


Si compone di una basetta reticolata radiotrasparente con marcatore di orientamento fisso riconoscibile ai raggi X delle porzioni craniale, caudale, mediale e laterale.

Il tessuto viene fissato con speciali perni in metallo e lasciato nella posizione topografica originale, in modo tale che sia possibile eseguire una corretta classificazione del pezzo escisso nelle tre dimensioni.

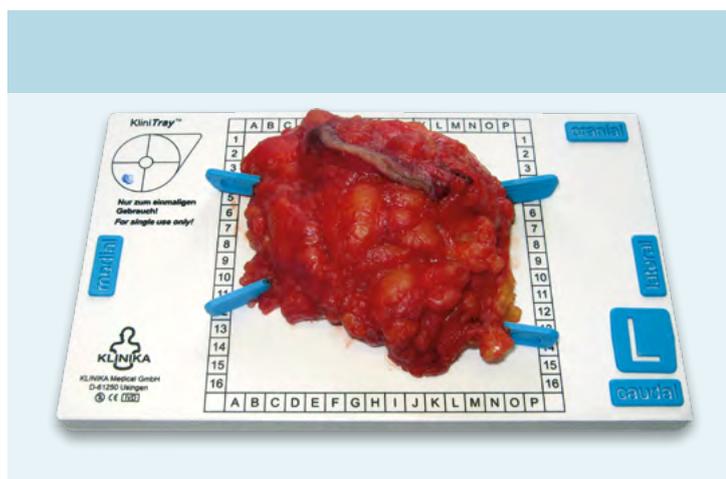

Fissaggio del tessuto con perni in metallo.

KliniTray™ è disponibile nelle versioni grande e piccola con i rispettivi contenitori da trasporto e un supporto per le radiografie in direzione cranio-caudale.

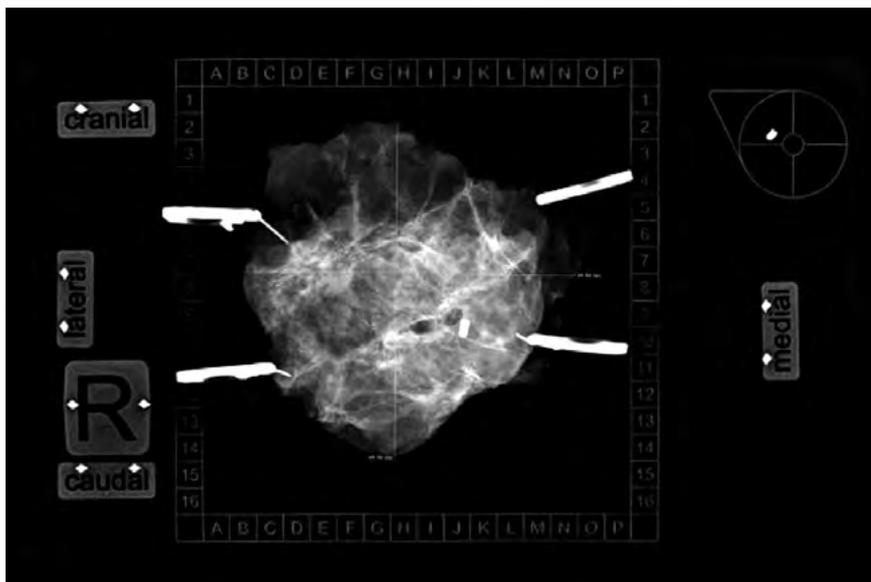

Radiografia orizzontale con reticolo delle coordinate per la determinazione dei margini di resezione liberi.

Articolo	Descrizione	Misure cm Volume ml	Pezzi/ Confezione	CND
2000600	KliniTray™ Miniboard, 4 pin di fissaggio, sterile	5 x 10 x 1	20	W05030599
1000700	KliniTray™ Extra small, 2 pin di fissaggio, sterile	4,5 x 6,7 x 1	20	W05030599
2001105	KliniTray™ Small - sinistra, 5 pin di fissaggio, sterile	9,5 x 16 x 1	20	W05030599
2001205	KliniTray™ Small - destra, 5 pin di fissaggio, sterile	9,5 x 16 x 1	20	W05030599
2001155	KliniTray™ Large - sinistra, 5 pin di fissaggio, sterile	18 x 20 x 1	20	W05030599
2001255	KliniTray™ Large - destra, 5 pin di fissaggio, sterile	18 x 20 x 1	20	W05030599
9002200	KliniTray™ Extra large - 10 pin di fissaggio con bandierina, uso universale, sterile	18 x 26 x 1	20	W05030599
2002100	KliniTray™ Wertheim - 6 pin di sicurezza + 2 pin metallici, sterile, uso ginecologico	18 x 26 x 1	20	W05030599
1000395	Contenitore di plastica per bassetta KliniTray™ Extra small	120 ml	5	W050299
1000390	Contenitore di plastica per bassetta KliniTray™ Miniboard	180 ml	20	W050299
1000300	Contenitore di plastica per bassetta KliniTray™ Small	1.000 ml	20	W050299
1000350	Contenitore di plastica per bassetta KliniTray™ Large	3.000 ml	20	W050299
1000370	Contenitore di plastica per bassetta KliniTray™ Extra large	5.500 ml	10	W050299
1000400	Stand per bassetta KliniTray™ per radiografie verticali	4 x 6,5 x 6	2	W05030501

Ditta produttrice, sede e Paese di produzione

Klinika Medical GmbH.
Achtzehnmorgenweg 6 - 61250 Usingen - Germania (DE).

Descrizione materiale

KliniTray™ è composto da una piastra plastica reticolata radiotrasparente con marcatore di orientamento fisso, riconoscibile ai raggi X delle porzioni cranial, caudal, medial e lateral.

Indicazioni

Dispositivo per analisi di tessuto e per la valutazione dei margini di resezione liberi.

Confezionamento

Busta singola.

Metodo di sterilizzazione, validità

R - Raggi gamma, 3 anni.

Modalità di conservazione e/o stoccaggio

Nessuna particolare.

Smaltimento dopo l'uso

In conformità a quanto previsto per i rifiuti infetti.

Conformità del prodotto a norme tecniche

Dispositivi medici in Vitro Direttiva 98/79.



Sunmedical è distributore esclusivo per l'Italia di KliniTray™



SUNMEDICAL S.r.l.

Via Modigliani, 45 - 20054 Segrate (MI)

T +39 02 87282900

F +39 02 87282910

E info@sunmedical.it

