



# KliniTray™

Dispositivo per l'analisi di tessuto e per la valutazione dei margini di resezione liberi.



KliniTray™ è un prodotto brevettato Klinika Medical

Il sistema **KliniTray™** consente l'analisi ed il trasporto di tessuti escissi prelevati dall'organismo, grazie all'ausilio di questo sistema, il tessuto può essere trasferito ed analizzato in un orientamento prestabilito tridimensionale spaziale e analizzato sia radiologicamente, sia ecograficamente.


Si compone di una bassetta reticolata radiotrasparente con marcatore di orientamento fisso riconoscibile ai raggi X delle porzioni craniale, caudale, mediale e laterale.

Il tessuto viene fissato con speciali perni in metallo e lasciato nella posizione topografica originale, in modo tale che sia possibile eseguire una corretta classificazione del pezzo escisso nelle tre dimensioni.


**KliniTray™** è disponibile nelle versioni grande e piccola con i rispettivi contenitori da trasporto e un supporto per le radiografie in direzione cranio-caudale.

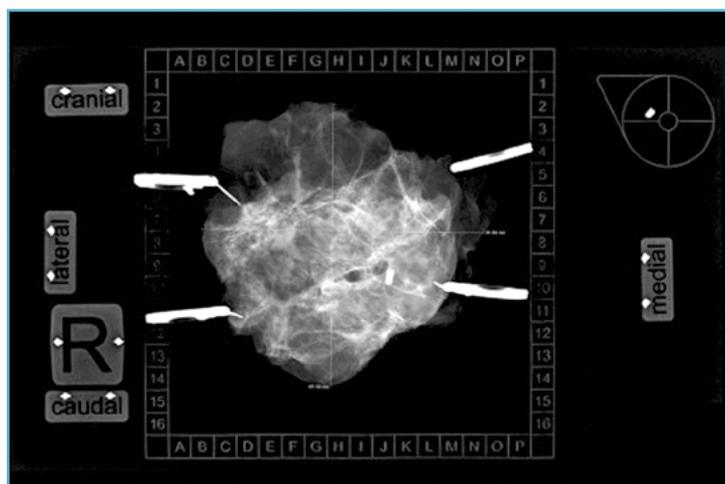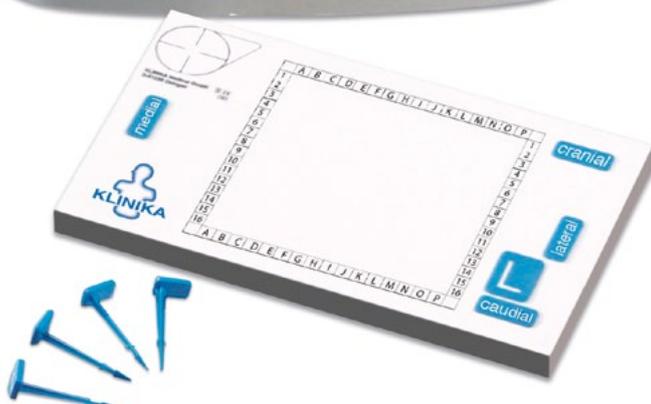


## Utilizzo

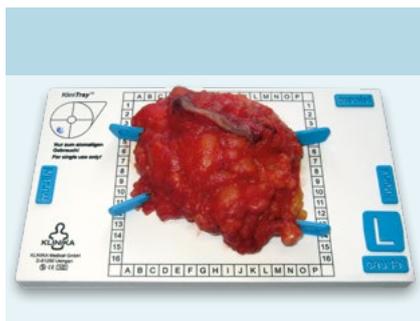

Fissaggio del tessuto con perni in metallo.

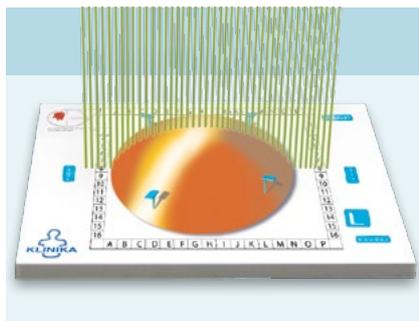

Radiografia orizzontale.

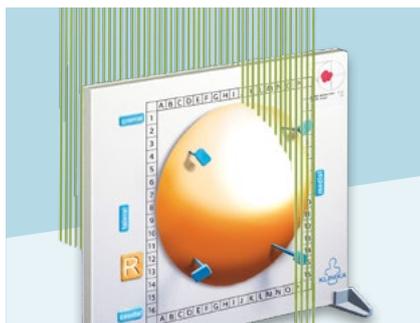


Radiografia verticale.




Misurazione dei margini di resezione liberi mediante ecografia del tessuto.

## X-Ray

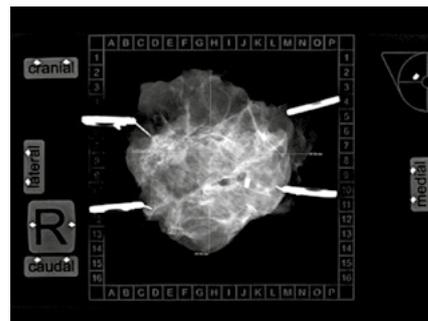

Radiografia orizzontale con reticolo delle coordinate per la determinazione dei margini di resezione liberi.

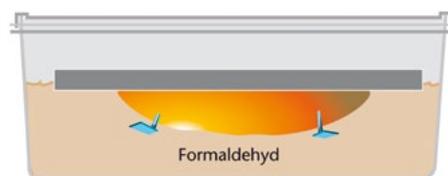

Trasporto del tessuto immerso in formalina nell'apposito contenitore per analisi di laboratorio.

Articolo	Descrizione	Misure cm Volume ml	Pezzi/ Confezione	CND
2000600	KliniTray™ Miniboard, 4 pin di fissaggio, sterile	5 x 10 x 1	20	W05030599
1000700	KliniTray™ Extra small, 2 pin di fissaggio, sterile	4,5 x 6,7 x 1	20	W05030599
2001105	KliniTray™ Small - sinistra, 5 pin di fissaggio, sterile	9,5 x 16 x 1	20	W05030599
2001205	KliniTray™ Small - destra, 5 pin di fissaggio, sterile	9,5 x 16 x 1	20	W05030599
2001155	KliniTray™ Large - sinistra, 5 pin di fissaggio, sterile	18 x 20 x 1	20	W05030599
2001205	KliniTray™ Large - destra, 5 pin di fissaggio, sterile	18 x 20 x 1	20	W05030599
1000395	Contenitore di plastica per bassetta KliniTray™ Extra small	120 ml	5	W050299
1000390	Contenitore di plastica per bassetta KliniTray™ Miniboard	180 ml	20	W050299
1000300	Contenitore di plastica per bassetta KliniTray™ Small	1000 ml	20	W050299
1000350	Contenitore di plastica per bassetta KliniTray™ Large	3000 ml	20	W050299
1000370	Contenitore di plastica per bassetta KliniTray™ Extra large	5500 ml	20	W050299
1000400	Stand per bassetta KliniTray™ per radiografie verticali	4 x 6,5 x 6	2	W05030501

### • Ditta produttrice, sede e Paese di produzione

Klinika Medical GmbH.  
Achtzehnmorgenweg 6 - 61250 Usingen - Germania (DE).

### • Descrizione materiale

KliniTray™ è composto da una piastra plastica reticolata radiotrasparente con marcatore di orientamento fisso, riconoscibile ai raggi X delle porzioni cranial, caudal, medial e lateral.

### • Indicazioni

Dispositivo per analisi di tessuto e per la valutazione dei margini di resezione liberi.

### • Confezionamento

Busta singola.

### • Metodo di sterilizzazione, validità

R - Raggi gamma, 3 anni.

### • Modalità di conservazione e/o stoccaggio

Nessuna particolare.

### • Smaltimento dopo l'uso

In conformità a quanto previsto per i rifiuti infetti.

### • Conformità del prodotto a norme tecniche

Dispositivi medici in Vitro Direttiva 98/79.



La linea KliniTray™ è distribuita  
in Italia in esclusiva da Sunmedical



SUNMEDICAL S.r.l.  
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI)  
T +39 02 87282900 F +39 02 87282910  
info@sunmedical.it