


Fasi del trattamento Urgent® PC




Sistema di neuromodulazione Urgent® PC

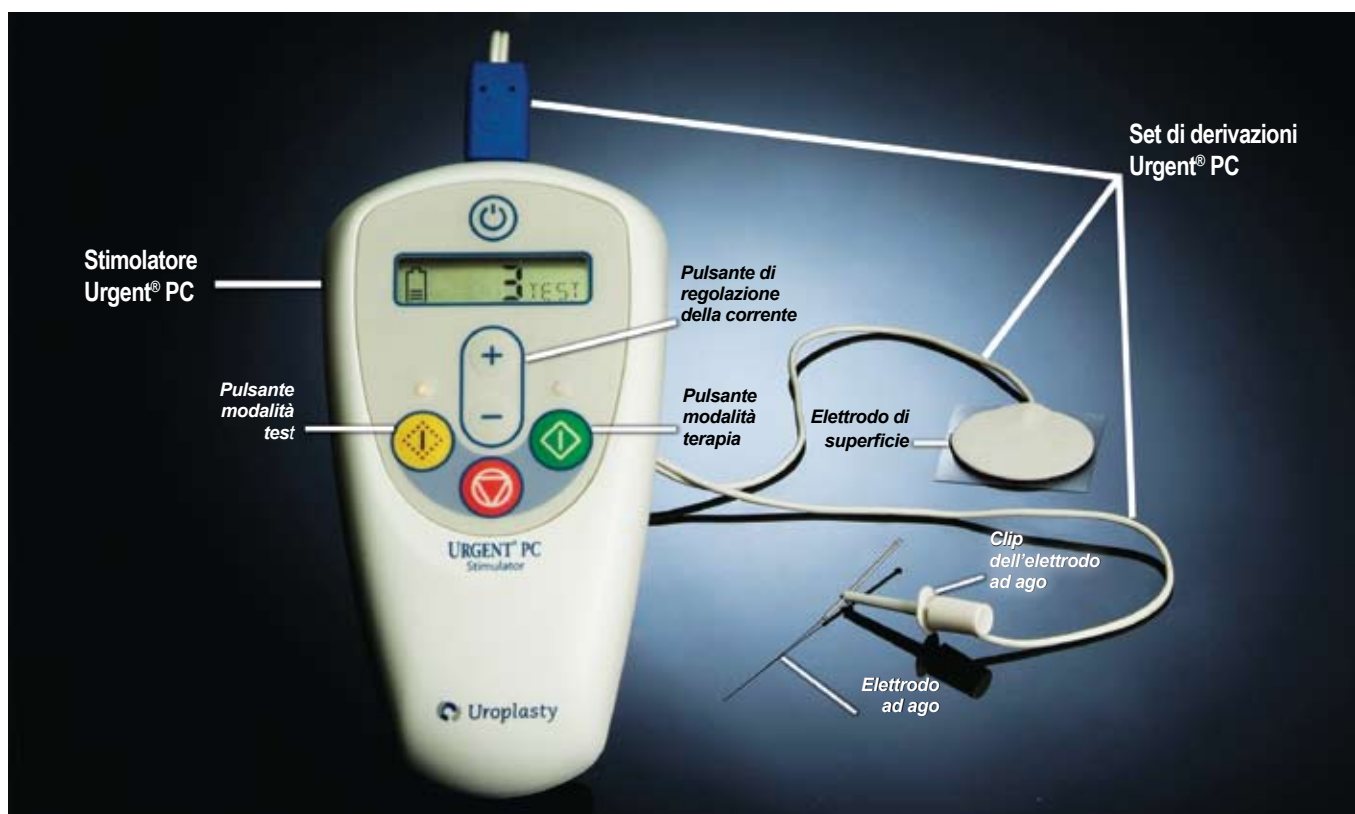

Fase 1: controllare la batteria

Prima di iniziare il trattamento controllare il livello della batteria. Per accendere lo stimolatore tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi. Cambiare la batteria quando sull'icona della batteria rimane solo una linea. Spegnerlo lo stimolatore.

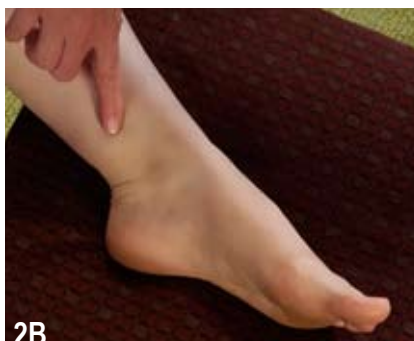

Fase 2: localizzare il punto di inserimento dell'ago

Per localizzare il punto di inserimento dell'elettrodo ad ago individuare la posizione che si trova a circa 3 dita in direzione cefalica rispetto al malleolo mediale (2A) e a circa 1 dito posteriormente rispetto alla tibia.



Fase 3: posizionare l'elettrodo ad ago con un angolo di 60°

Pulire il punto di inserzione con il tampone imbevuto di alcool fornito in dotazione. Prima di rimuovere la cannula trasparente o il tappo rosa di arresto posizionare l'elettrodo ad ago sopra la posizione di inserzione. L'ago deve trovarsi ad un angolo di 60° rispetto alla caviglia. Togliere il tappo di arresto.



Fase 4: inserire l'elettrodo ad ago

Picchiettare delicatamente sulla parte superiore dell'elettrodo ad ago per forare la pelle. Togliere la cannula.



Fase 5: far avanzare l'elettrodo ad ago

Con un movimento rotatorio far avanzare l'elettrodo ad ago fino ad inserirne nella gamba circa 2 cm o metà della parte inferiore. È importante mantenere un angolo di 60° mentre si avvanza parallelamente alla tibia.



Fase 6: collegare il filo di derivazione allo stimolatore



Fase 7: posizionare l'elettrodo di superficie

Rimuovere il supporto adesivo dall'elettrodo di superficie. Mettere l'elettrodo di superficie sull'arco interno del piede della gamba trattata.



Fase 8: attaccare la clip dell'elettrodo ad ago

Attaccare la clip dell'elettrodo ad ago premendo lo stantuffo ed agganciarla all'elettrodo ad ago. Accendere lo stimolatore.




Fase 9: selezione della modalità Test

Entrare nella modalità test tenendo premuto il pulsante giallo Test per 2 secondi.



Fase 10: identificare il livello di trattamento

Utilizzando il pulsante di regolazione della corrente aumentare lentamente l'impostazione osservando il piede del paziente per vedere se reagisce.

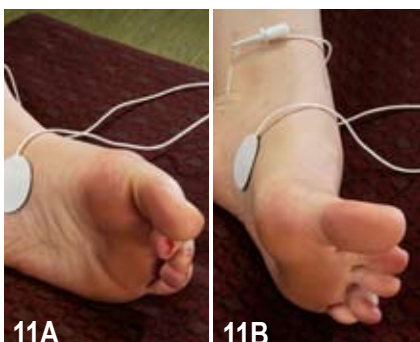

Fase 11: confermare la reazione del paziente

La reazione del paziente è solitamente un dito flessso (11A) o allargato (11B). Tuttavia in alcuni pazienti il posizionamento dell'elettrodo ad ago e la stimolazione, benché corretti, possono solo provocare una lieve sensazione nella zona della caviglia e nella pianta del piede.



Fase 12: Modalità Terapia

Ridurre l'impostazione di corrente di un livello e premere il pulsante verde Terapia per 2 secondi. La modalità terapia è impostata automaticamente per 30 minuti.



Fase 13: il paziente è sottoposto al trattamento con il sistema di neuromodulazione Urgent® PC

Il paziente viene fatto sedere comodamente durante il trattamento.



Fase 14: completare la seduta di trattamento

La modalità Terapia termina automaticamente dopo 30 minuti. A questo punto lo stimolatore visualizza la parola “End” (fine) ed emette una serie di tre bip. Spegnerlo lo stimolatore e togliere l'elettrodo ad ago e gli altri componenti.



Uroplasty BV, Hofkamp 2, 6161 DC Geleen, Paesi Bassi

Tel: + 31 (0)46 423 79 20, Fax: +31 (0)46 423 79 22, e-mail: info.holland@uroplasty.com

Uroplasty, Ltd, Manchester Business Park, 3000 Aviator Way, Manchester M22 5TG, RU

Tel: 0800 032 5964, Fax: 0800 032 5965, e-mail: info.uk@uroplasty.com

www.uroplasty.com

Informazioni sul trattamento PTNS

Il sistema di neuromodulazione Urgent PC di Uroplasty, Inc. fornisce una stimolazione percutanea del nervo tibiale (PTNS) per il trattamento dell'urgenza urinaria, della frequenza urinaria e dell'incontinenza da urgenza. Urgent PC è indicato anche per il trattamento dell'incontinenza fecale. La tecnologia del dispositivo e il protocollo di trattamento si basano sul dispositivo SANS (Stoller's Afferent Nerve Stimulator – Stimolatore del nervo afferente di Stoller).

Per istruzioni complete su uso, conservazione, avvertenze, indicazioni, controindicazioni, precauzioni, reazioni avverse ed esonero della responsabilità in relazione alla garanzia, fare riferimento al foglietto illustrativo allegato a ogni prodotto Urgent PC.

Urgent e Uroplasty sono marchi commerciali registrati di Uroplasty, Inc.

© 2009 Uroplasty, Inc. Tutti i diritti riservati. 0525028A-Italiano 10/09